

Información general

Nombre comercial	Set Epidural - Espinal Combinado - COMBIFIX®
Marca / Fabricante	Egemen Internacional / TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMELERI SAN. VE TIK A,S.
Registro Sanitario	10930-DME-1220
Clasificación del riesgo	IV
Método de Esterilización	Óxido de Etileno
Vida útil	5 años
Códigos de Referencias	Cuadro de Referencia

Descripción del Producto

CARACTERISTICAS:

Componente	Especificación
Aguja epidural	Acero inoxidable de calidad 304
Fijador de aplicación combinada	ABS y elastómero termoplástico.
Aguja espinal	Acero inoxidable de calidad 304
Catéter epidural	Poliamida
Filtro epidural	ABS transparente (Acrilonitrilo butadieno estireno) / filtro 0,2 µ
Adaptador Tuohy Borst	Cuerpo - ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno) transparente Cubierta - PE (polietileno)
Dispositivo de fijación del filtro	Adhesivo de grado médico
Dispositivo de fijación del catéter	Adhesivo de grado médico
Cánula de aspiración filtrada	PP (polipropileno) Filtro - PES (polietersulfona) 5 µ Aguja hipodérmica - Acero inoxidable



Código de Referencia	Aguja TOUHY			Punta de lápiz Aguja espinal 27G	Bisel tipo Quincke Aguja espinal 27G	EPISAFE® Catéter estándar 20G con 3 orificios laterales	EPISOFT® Catéter Atraumático con Punta blanda 20G 3 Orificios laterales	EPIUNO® Catéter Atraumático 20G con 6 agujeros laterales	EPIUNO SOFT® Catéter Atraumático con Punta blanda 20G 6 agujeros laterales	EPILO® Jeringa 10cc	Filtro Epidural 0.2µ	FLEXIFIX® Dispositivo de fijación de catéteres	PROFIX® Dispositivo de fijación del filtro	Tuohy Adaptador Borst	Cánula de Aspiración Filtrada
	16G-90mm	18G-80mm	18G-90mm												
TSWS163	x			x		x				x	x	x	x	x	x
TSWX163	x			x		x					x	x	x	x	x
TSWSS163	x			x			x			x	x	x	x	x	x
TSWXS163	x			x			x				x	x	x	x	x
TSWSU166	x			x				x		x	x	x	x	x	x
TSWXU166	x			x				x			x	x	x	x	x
TSWSUS166	x			x					x	x	x	x	x	x	x
TSWXUS166	x			x					x		x	x	x	x	x
TSWS183		x		x		x				x	x	x	x	x	x
TSWX183		x		x		x					x	x	x	x	x
TSWSS183		x		x			x			x	x	x	x	x	x
TSWXS183		x		x			x				x	x	x	x	x
TSWSU186		x		x				x		x	x	x	x	x	x
TSWXU186		x		x				x			x	x	x	x	x
TSWSUS186		x		x					x	x	x	x	x	x	x
TSWXUS186		x		x					x		x	x	x	x	x
TSWS183Q		x			x	x				x	x	x	x	x	x
TSWX183Q		x			x	x					x	x	x	x	x
TSWSS183Q		x			x		x			x	x	x	x	x	x
TSWXS183Q		x			x		x				x	x	x	x	x
TSWSU186Q		x			x			x		x	x	x	x	x	x
TSWXU186Q		x			x			x			x	x	x	x	x
TSWSUS186Q		x			x				x	x	x	x	x	x	x
TSWXUS186Q		x			x				x		x	x	x	x	x
TSWSS18D3			x	x			x				x	x	x	x	x
TSWXS18D3			x	x			x				x	x	x	x	x
TSWSU18D3Q			x		x		x				x	x	x	x	x
TSWSS18D3Q			x		x		x				x	x	x	x	x

Uso Previsto y Descripción Funcional

Se utiliza para inyectar la sustancia anestésica en la zona de la columna vertebral, LCR (líquido cefalorraquídeo) donde se desea comenzar inmediatamente. Luego se mantiene la anestesia con la ayuda de un catéter epidural.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar en ambientes frescos, secos y sin polvo (10-35°C, 30-70% de humedad).

ADVERTENCIAS/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- Todas las intervenciones relacionadas con el uso de este dispositivo médico durante y después de su aplicación deben realizarse únicamente por un médico especializado en el tema.
- No utilice paquetes rotos o dañados. No son estériles.
- La cánula puede doblarse o romperse al aplicar una fuerza excesiva durante la intervención.
- El adhesivo en el dispositivo de fijación del catéter y en los dispositivos de fijación del filtro, las cintas y el paño quirúrgico adhesivo, puede causar una reacción en pieles sensibles.
- Después de su uso, elimine el dispositivo de acuerdo con las normas de eliminación de desechos médicos.
- No aplique ninguna técnica que no sea el procedimiento aprobado.
- Utilice este dispositivo médico sólo para el propósito previsto mencionado.
- Los componentes de este kit, están en conformidad entre sí y puede haber incumplimiento si se utiliza con otras marcas y productos.
- Durante la retirada del catéter, no fuerce si hay resistencia. Entonces inténtelo de nuevo inyectando solución salina dentro del catéter con alta presión y retirarse (sin forzar).
- Este dispositivo médico es de un solo uso. La reutilización o re-esterilización del paquete original después de abrirlo es peligroso y puede causar contaminación cruzada, infección y trauma.